




WATCHMAN™ O único dispositivo de oclusão percutânea de AAE aprovado pela FDA, com mais de 3000 pacientes em diversos estudos randomizados e registros e 6000 paciente de acompanhamento.

Circ Cardiovasc Interv. 2017 Nov; 10(11):e005359
Korean Circ J. 2018 Aug; 48(8):692-704


Redução do risco de derrame em fibrilação atrial com o dispositivo WATCHMAN de oclusão de apêndice esquerdo

SELEÇÃO DE PACIENTES

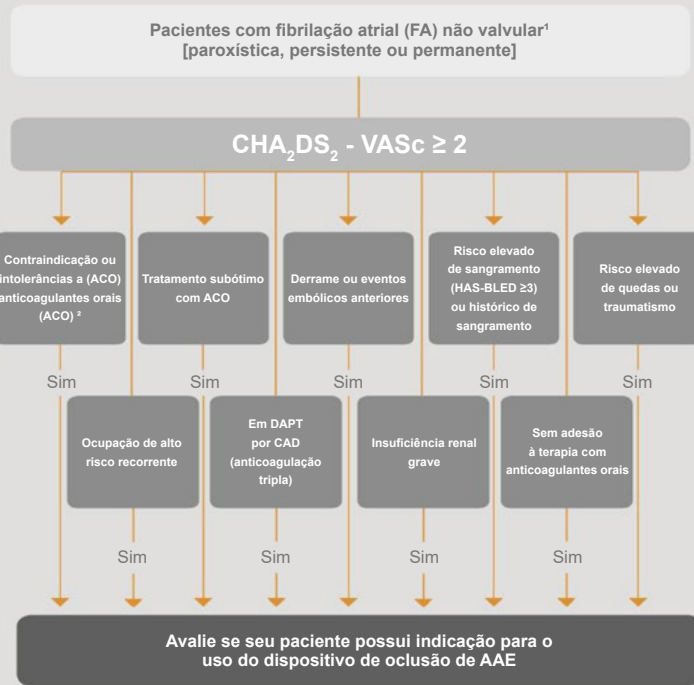

Tzilas et al, Europace 2017; 19(1): 4-15

- 1 - FA não valvular: com exceção de valvopatia reumática e válvulas cardíacas protéticas
- 2 - Para detalhes sobre contraindicações, consulte as instruções de uso dos medicamentos anticoagulantes. Os NACO (dabigatrana, rivaroxabana e apixabana) não são recomendados para pacientes que sofrem de alteração renal grave (CrCl <30 ml/min). Atualização de 2012 das diretrizes da ESC para tratamento da fibrilação atrial.
- 3 - Acidente isquêmico transitório
- 4 - Exemplos: dificuldades para estabilizar a RNI na faixa terapêutica, problemas de adesão ao tratamento prescrito, interrupção do tratamento com o medicamento...

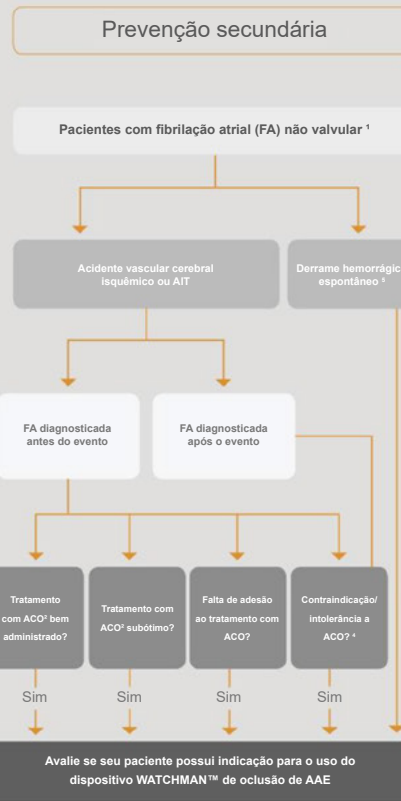

- 1 - FA não valvular: com exceção de valvopatia e válvulas cardíacas protéticas
- 2 - Anticoagulante oral
- 3 - Exemplos: dificuldades para estabilizar a RNI na faixa terapêutica, problemas de adesão ao tratamento prescrito, interrupção do tratamento com o medicamento...
- 4 - Para detalhes sobre contraindicações, consulte as instruções de uso dos medicamentos anticoagulantes. Os NACO (dabigatrana, rivaroxabana e apixabana) não são recomendados para pacientes que sofrem de alteração renal grave (CrCl <30 ml/min). Atualização de 2012 das diretrizes da ESC para tratamento da fibrilação atrial.
- 5 - Hipertensão, angiopatia, ANK ou ACO...

Risco tromboembólico

Letra	Fator de risco	Pontuação
C	Insuficiência cardíaca congestiva/ disfunção VE	1
H	Hipertensão	1
A ₂	Idade ≥ 75	2
D	Diabetes mellitus	1
S	Derrame / AIT / tromboembolismo	2
V	Doença vascular	1
A	Idade entre 65- 74	1
Sc	Sexo (feminino, por exemplo)	1
TOTAL (máx. 9)		

Pontuação total	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Risco anual de evento	0,0	1,3	2,2	3,2	4,0	6,7	9,8	9,6	6,7	15,2

Lip GY et al, Chest 2010; 137(2): 263 - 72
Camm AJ et al, Eur Heart J 2010; 31; 2369 - 2429

Risco de sangramento

Letra	Característica clínica	Pontos atribuídos
H	Hipertensão	1
A	Função renal e hepática anormais (1 ponto cada)	1 o 2
S	Derrame	1
B	Hemorragia	1
L	Labilidade da RNI	1
E	Idade avançada (idade 65 anos, por exemplo)	1
D	Medicamentos ou alcoolismo (1 ponto cada)	1 o 2
TOTAL (máx. 9)		

Pontuação total	0	1	2	3	4
Risco anual de evento	1,13	1,02	1,88	3,74	8,70

Pisters R, et al. Chest 2010; 138:1093-100
Europe Heart Journal 2012; doi:10.1093/eurheartj/ehs253

Indicações

A tecnologia de oclusão de AAE WATCHMAN™ é indicada para prevenir embolias por trombos do apêndice atrial esquerdo e reduzir o risco de eventos hemorrágicos graves em pacientes com fibrilação atrial não valvular candidatos à terapia anticoagulante ou que sejam contraindicados a essa mesma terapia.

CAUTION: The law restricts these devices to sale by or on the order of a physician. Indications, contraindications, warnings and instructions for use can be found in the product labelling supplied with each device. Products shown for INFORMATION purposes only and may not be approved or for sale in certain countries. Please check availability with your local sales representative or customer service. Boston Scientific Corporation® or its affiliates. All rights reserved.
SH-758310-AA FEV2020